

DATENBLATT

CLEARTEST Multi Drug Cup

PRODUKTBILDER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Neu: Jetzt mit "Schlüssel"-Funktion

Die objektive Drogenüberwachung im Urinbecher. Anzeigend wahlweise 8-er Drogenkombination oder individuell für bis zu 12 Drogen.

Handhabung:

Der Patient gibt seine Urinprobe in das Schraubgefäß. Der im Deckel befindliche „Schlüssel“ verbleibt im Labor. Erst im Labor wird mit Hilfe des Eindrückschlüssels das Ventil geöffnet und die Teststreifen reagieren. Die Schutzfolie am Gefäß wird abgezogen und evtl. Drogenrückstände werden angezeigt. Um Manipulationen – z.B. durch Wasserzugabe – zu erschweren, kann am integrierten Thermometer die Einfüll-Temperatur des abgegebenen Urins kontrolliert werden. Jeder Testbecher ist einzeln eingesiegelt.

Produktdaten

- Auswertung nach 3 Minuten
- Lagerung bei 2 - 30 °C, nicht einfrieren

Bei Abnahme ab 100 Stück individuelle Drogenkombination wählbar.

Parameter Typ Cut-Off-Level

Amphetamin AMP 1000 ng/ml

Methamphetamin MET 1000 ng/ml

Benzodiazepine BZD 300 ng/ml

Barbiturate BAR 200 ng/ml

Morphin/Opiate MOR 300 ng/ml

Cannabis/Marihuana THC 50 ng/ml

Kokain COC 300 ng/ml

Phencyclidin PCP 25 ng/ml

VARIANTEN

Typ	PZN	REF	VE
8-fach-Test	09751512	C3 700	1 Test

DATENBLATT - BESTELLFORMULAR

CLEARTEST Multi Drug Cup

BESTELLISTE (VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN)

Artikel	REF	VE	Menge

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer:

Firma:

Vorname / Nachname:

E-Mail:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs. Unsere gültigen AGBs finden Sie unter: <https://www.servoprax.de/en/terms-and-conditions--/>